

Práctico y rápido. Sólo en 10 minutos con sabor a fruta.

Kit Blanqueador Dental by Clinic Tech^{RF}

Sistema Profesional de Blanqueamiento Dental para uso doméstico.

- Lámpara de 5 Luces azules frías de tecnología LED.
- 0% de peróxido
- 100% Natural

Uso exclusivo para:

Manchas exógenas causadas por pigmentaciones en los dientes de fumar, comida, té, cola, café, etc.
Manchas endógenas causadas por pigmentaciones de los dientes como tetraciclina, fluorosis dental, placa bacteriana u otras razones desconocidas.



Laboratorios Loheor, s.l.
www.clinictech.es



Kit Blanqueador Dental by Clinic Tech^{RF}
Manual de Instrucciones



Gracias por adquirir el KIT de Blanqueamiento Dental de CLINIC TECH^{RF}, desarrollado por LABORATORIOS LOHEOR, conseguirás unos dientes más blancos y saludables de una forma increíble y con productos naturales para cuidar tu bienestar. Vive mejor, cuidate y disfruta de la vida con CLINIC TECH^{RF}. En Clinic Tech^{RF} nos preocupamos por tu salud y queremos ofrecerte los mejores productos para que puedas sentirte bien por dentro y por fuera. De esta filosofía nace El kit de tecnología LED de luces frías y blanqueamiento dental y su ya exitoso El Plan 1-2-3. Te sentirás mejor, con más energía y perderás esos quilos que te sobran. Gracias al soporte de Laboratorios Loheor S.L. con Registro General Sanitario E. A. 26 015590/B podemos ofrecer productos de calidad y que son totalmente seguros para el consumo. Además, contamos con la colaboración de médicos especialistas, expertos en herboristería y dietética que han hecho posible que este método funcione y sea efectivo. ¡Con Clinic Tech si se puede!

Instrucciones de uso:

- 1 - Antes de usar lave con agua abundante el paladar de silicona y séquelo.
- 2 - Cepílese con su pasta de dientes habitual antes de su uso.
- 3 - Separe las baterías, introdúzcalas en la lámpara y cierre la tapa.
- 4 - Coloque el paladar de silicona en el soporte unido a la lámpara.
- 5 - Aplicar 1/6 de gel en el Paladar de silicona abajo y arriba de la posición frontal de los dientes, sin tocar las encías.
- 6 - Introducir en la boca en contacto con los dientes, pulsar el interruptor de la lámpara LED para encenderla y automáticamente se apagará al pasar los 10 minutos con un sonido acústico de aviso.
- 7 - Una vez terminado el tiempo, retirar de la boca, enjuagar los dientes y la boca con agua tibia, luego quitar el paladar unido a la lámpara, limpiarlo y secarlo antes de guardarlo.
- 8 - Repetir este procedimiento de blanqueamiento Dental durante 6 días consecutivos.



Recomendaciones:

- Utilice la guía dental profesional de gama y escala de dientes blancos para supervisar su progreso.
- Este sistema de blanqueamiento de dientes es más eficiente si el tratamiento se realiza de forma consecutiva.
- Se puede blanquear los dientes como máximo hasta 12 días consecutivos.
- No se recomienda el tratamiento de blanqueamiento más de 2 veces por día.
- Fumar, consumir vino tinto, café, té, cola, curry, comida y bebidas con coloración oscura, debe evitarse durante el periodo de blanqueamiento y durante dos semanas después del blanqueamiento para obtener óptimos resultados.
- Puede sentir algo de irritación de los tejidos blandos leve y sensibilidad transitoria durante el proceso de blanqueamiento.
- Sin embargo, si se produce, por lo general es temporal y desaparece en poco tiempo. Utilice nuestro gel no use otro producto, si se extiende las molestias o tiene excesiva sensibilidad consulte a su dentista.

Precaución:

- No lo utilice si se encuentra en las siguientes situaciones: niños, mujeres embarazadas, que tienen graves problemas gingivales, experimentó una operación bucal últimamente.
- El producto sólo tiene efecto en los dientes, es apto para la piel y cualquier otro órgano, No tragar el gel.
- Si el Gel de blanqueamiento entra en contacto con los ojos, levarse inmediatamente con agua abundante.

Ingredientes del Gel blanqueador en la Jeringa:

Glicerina vegetal orgánica (Kosher, UPS) Orgánico Natural bicarbonato de sodio (Kosher, UPS) Extractos de sabor Orgánica Kosher, sin GLUTEN, natural xilitol, Carbómero 940, sorbitol, trolamina, jugo de hoja de Aloe, extracto de semilla de granada, extracto de flor de manzanilla.

Conservación:

- Guardarlo en lugar seco y fresco, evitar la luz.
- Periodo de validez 2 años
- Made in Bélgica